



MEDI SET



## História

Criada mediante a necessidade do mercado em otimizar custos, sem perder qualidade e eficiência, a empresa traz como principal pilar a tecnologia, importante aliada em nossos produtos e serviços.



## Missão

Como importadora e distribuidora, buscamos novos produtos e tecnologias que permitam a habilitação precoce dos pacientes, diminuição do tempo cirúrgico e materiais menos invasivos,



## Visão

Ser reconhecida pelo mercado como uma empresa que promova qualidade e inovação em seus produtos, confiança em seus serviços e eficácia em seus processos.



## Serviços

- Importação, armazenamento e distribuição de materiais médicos
- Promoção de serviços na área da saúde de alta qualidade, confiabilidade e legitimidade,

# INTEGUSEAL

O Selante Microbiano INTEGUSEAL® imobiliza patógenos perigosos, reduzindo o risco de infecções pós cirurgias

Conforme estudo realizado in vitro o selante microbiano Integuseal reduziu significativamente os níveis de MRSA em 99,9%, S. epidermidis em 99,5% e E. coli em cerca de 96%



## Principais características:

- Seca em até 2 minutos
- Seguro e conveniente em ambientes clínicos
- Aplicação fácil ao longo dos contornos do corpo
- Resistente à água e Respirável
- Desprende-se naturalmente em 5-7 dias
- Compatível com diversas soluções de preparação

# INTEGUSEAL

Product Code	Coverage Area
IS100	25x25cm or 10x10in*
IS200	50x25cm or 20x10in*



## Instrução de uso

**Preparação:** O integuseal é compatível com as principais soluções de assepsia do campo cirúrgico. Sendo aplicado sob a solução escolhida

**Selagem:** Com a ponta de espuma voltada para baixo, ative o aplicador pressionando a extremidade até que o produto seja completamente exposto. Use imediatamente para aplicar uma camada uniforme e continue sobre toda a área exposta, sem interrupções entre as passagens.

**Cobertura:** Deixe o Selante Microbiano integuseal secar e, em seguida, aplique as cortinas normalmente. Pode ser usado com cortinas cirúrgicas padrão ou cortinas incisais.






MEDI SET



Quer saber mais?  
ACESSE O QR CODE ABAIXO

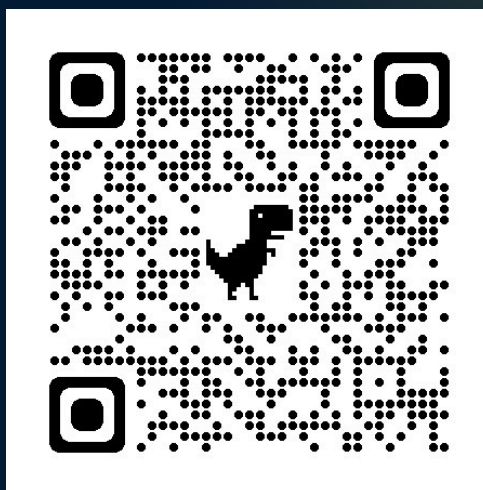

[mediset.com.br](http://mediset.com.br)  
[vendas@mediset.com.br](mailto:vendas@mediset.com.br)



**Integuseal**

Selante microbiano  
Comercializado por Mediset  
Fabricante: Advanced Medical  
Solutions Limited  
Origem: Reino Unido



MEDI SET